



HOFFMANN

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK

Gebrauchsanweisung für individuell gefertigte Einlagen

Ihr Arzt hat Ihnen ein Paar orthopädische Einlagen verordnet, die von uns sorgfältig angefertigt wurden. Hiermit erhalten Sie einige Gebrauchs- und Pflegehinweise für Ihre Einlagen, die helfen sollen, Ihre Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, Ihre Beschwerden zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden. Sinn und Zweck erfüllen diese Einlagen jedoch nur dann, wenn Sie den nachstehenden Hinweis berücksichtigen. Das Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des MPG und entspricht den Anforderungen des Anhang 1 der Richtlinie 93/42/EWG.

1. Falls Sie noch nie Einlagen getragen haben, bedenken Sie bitte, dass sich Ihr Fuß erst an das neue Fußbett gewöhnen muss. Legen Sie die Einlage am Anfang nur einen halben Tag lang in die Schuhe und steigern Sie die Tragezeit innerhalb von 8 bis 14 Tagen. Sollten Ihnen die Einlagen nach dieser Zeit immer noch unangenehm sein, so legen Sie sie bitte nicht einfach weg, sondern suchen Sie uns oder Ihren Arzt auf. Oft ist nur eine Kleinigkeit zu ändern, die jedoch entscheidend dazu beiträgt, Sie von Schmerzen zu befreien.
2. Die hohe Beanspruchung der Einlagen gewährleistet eine exakte Abstützung nur bis zu einem halben Jahr. Nach dieser Zeit sollten Sie ebenfalls zur Kontrolle bei Ihrem Arzt oder bei uns vorbeikommen. Natürlich überprüfen wir gerne auch vor dieser Zeit laufend Ihre Einlagen.
3. Bei Kindern ist besonders auf das Wachstum zu achten. Zu kleine Einlagen richten oft einen größeren Schaden an, als wenn überhaupt keine Einlagen getragen werden. Bitte suchen Sie daher in jedem Falle einen Arzt auf, wenn Sie Ihrem Kind größere Schuhe kaufen müssen. Ein zu kleiner Schuh ist ein sicheres Zeichen dafür, dass auch die Einlagen ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Die laufende Kontrolle der Einlagen ist ebenso wichtig, wie das Schuhwerk. Heute sind Schuhe auf dem Markt, die eigens für lose Einlagen gearbeitet wurden. Bitte lassen Sie sich von uns beraten, welche Schuhe Sie für Ihr Kind benötigen.
4. Für Diabetiker gilt unser spezielles Merkblatt mit.
5. Bitte beachten Sie, dass Einlagen nicht in Sicherheitsschuhen getragen werden dürfen, da dies eine Veränderung am Sicherheitsschuh darstellt und Ihr Versicherungsschutz entfällt. Die Tragedauer im Sinne des Medizinproduktegesetzes beträgt ein halbes Jahr, die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist auf ein halbes Jahr reduziert.

Reinigung und Pflege:

- Lederbezogene Einlagen sind nach dem Gebrauch zum Lüften aus den Schuhen zu nehmen und langsam zu trocknen. Keinen Wärmequellen auszusetzen!
- Kunststoff- und Microfaserbezüge können mit einem feuchten Tuch abgerieben werden.
- Da nur nach MPG geprüfte Materialien verarbeitet werden, sind allergische Reaktionen auszuschließen. Falls sie dennoch auftreten, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung!
- Die Einlagen dürfen nicht über 50 °C erhitzt werden.
- Lassen Sie Ihre Einlagen regelmäßig kostenlos bei uns kontrollieren, um möglichen Verschleiß bezüglich Stützung und Dämpfung zu erkennen.



HOFFMANN
ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK

Niederlagstraße 4
01589 Riesa
Telefon (03525) 73 38 59
www.hoffmann-orthopaedie.de

Öffnungszeiten: Mo 9 - 12 Uhr, Di - Fr 9 - 13 u. 14 - 18 Uhr

Empfangsbestätigung:

Hiermit bestätige ich den Empfang des orthopädischen Hilfsmittels.

Mit Sitz und Ausführung bin ich, soweit es jetzt zu beurteilen ist, zufrieden.

Über den Gebrauch, die Pflege, Sicherheitshinweise und den Umgang mit dem Hilfsmittels bin ich ausführlich informiert worden.

Durch den Lieferanten wird die Konformität des Produktes erklärt. Eine Gebrauchsanweisung wurde ausgehändigt.

Ort, Datum, Unterschrift (Kunde)



Christian Hoffmann
01591 Riesa
geb.: 12.03.1953
P05729

Ort, Datum, Unterschrift (Lieferant)