

# Information

für orthopädische Maßschuhe  
und Diabetiker



**HOFFMANN**

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK

# Merkblatt für orthopädische Maßschuhe

Ihr Arzt hat Ihnen ein Paar orthopädische Maßschuhe verordnet, die von uns sorgfältig angefertigt wurden. Hiermit erhalten Sie einige Gebrauchs- und Pflegehinweise für Ihre orthopädischen Maßschuhe, die helfen sollen, Ihre Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, Ihre Beschwerden zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden. Sinn und Zweck erfüllen diese orthopädischen Maßschuhe jedoch nur dann, wenn Sie den nachstehenden Hinweis berücksichtigen. Das Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des MPG und entspricht den Anforderungen des Anhang 1 der Richtlinie 93/42/EWG.

1. Tragen Sie bitte ausschließlich Ihre Maßschuhe, also auch im Haus und während der Freizeit. Hausschuhe, Badeschuhe und Sportchuhe nach Maß können ebenfalls bei Bedarf verordnet werden.
2. Auch Maßschuhe müssen eingelaufen werden! Bitte tragen Sie Ihre neuen Maßschuhe am Anfang nur stundenweise und kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Füße nach eventuellen Druckstellen.
3. Stellen Sie Ihre Füße vor dem Zuziehen der Schuhe auf die Hacke, um sicherzustellen, dass Sie nicht nach vorne in den Schuh rutschen. Schließen Sie die Schuhe gleichmäßig, ohne übermäßigen Druck.
4. Bei eventuellen Schmerzen oder Veränderungen aufgrund der Schuhe, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Bringen Sie bitte ein Wechselpaar mit).
5. Damit Ihre Schuhe lange ihren Dienst tun, pflegen Sie diese bitte regelmäßig. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege- und Reinigungsmittel.
6. Selbstverständlich führen wir alle Reparaturen an Ihren Maßschuhen in eigener Werkstatt fachgerecht durch. Bitte beachten Sie, dass nur wir im Besitz der Originalleisten Ihrer Schuhe sind.
7. Für Diabetiker gilt unser spezielles Merkblatt mit.
8. Die Tragedauer im Sinne des Medizinproduktegesetz beträgt 2 Jahre, bei Hausschuhen 4 Jahre.



**Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.**